

AXP

axioprisa

+

MEDIT



manual



1.

Erstellen Sie einen neuen Fall

Create a new case

The screenshot shows the MEDIT Link Case Box interface. A blue button labeled '+ Neuer Fall' is circled in yellow. A hand icon points to the button. The interface includes a sidebar with navigation options (Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, Trash Box) and a main table of cases. The table has columns for Status, Fallname, Patientenname, Geburtsdatum, Formularinformationen, Geänderte Datum, Scannen-Datum, Bestelldatum, and Laborname. The table contains 13 rows of case data.

Status	Fallname	Patientenname	Geburtsdatum	Formularinformationen	Geänderte Datum	Scannen-Datum	Bestelldatum	Laborname
Scan Completed	Fall von sam	sam	-	1-Bisssschiene	22.07.2022 11:14	22.07.2022 11:07		
Form Only	Fall von Mannheim	Mannheim	-	1-Bisssschiene	20.07.2022 18:10			
Scan Completed	Fall von Suttgart Degerloch - Klonen	Suttgart Degerloch	-	46-Krone	19.07.2022 12:45	19.07.2022 12:39		
Scan Completed	Fall von Suttgart Degerloch	Suttgart Degerloch	-	46-Krone	19.07.2022 12:29	19.07.2022 12:18		
Scan Completed	Fall von waldach	waldach	-	1-Bisssschiene	18.07.2022 13:20	18.07.2022 13:15		
Form Only	Fall von böblingen	böblingen	-	1-Clear Alginer	18.07.2022 11:33			
Scan Completed	Fall von augsburg	augsburg	-	22-Krone / 23-Zwischenglied / 24-Zwischenglied / 25-...	29.06.2022 14:14	29.06.2022 13:56		
Ordered	Fall von huh	huh	-	1-Bisssschiene	29.06.2022 13:16	29.06.2022 13:09	29.06.2022 13:16	Labor Cookie
Ordered	Fall von ulm	ulm	-	1-Bisssschiene	28.06.2022 14:41	28.06.2022 14:31	28.06.2022 14:41	Labor Cookie
Form Only	Fall von test1	test1	-	-	28.06.2022 14:15			
Scan Completed	Fall von 1324	1324	-	24-Krone / 25-Krone / 26-Zwischenglied / 27-Krone	24.06.2022 16:35	22.06.2022 17:26		
Need Processing	Fall von entfernung	entfernung	-	-	24.06.2022 16:35	24.06.2022 16:34		
Form Only	Fall von test1	test1	-	25-Krone / 26-Krone / 27-Krone / 28-Krone	24.06.2022 16:01			

2.


Geben Sie den Namen des Patienten und den Namen des Falles ein

Type in the patient name and the name of the case

The screenshot shows the MEDIT Link Case Box interface with a dialog box titled 'Informationen zu neuem Fall' open. The dialog box has two input fields: 'Patientenname\*' and 'Fallname\*'. Below the input fields, there is a note: 'Die Erstellung von Patienteninformationen erfordert die Zustimmung der Patienten. Patienteninformationen können während der Auftragserteilung für 3 Parteien freigegeben werden.' Below the note, there is a link 'Geschäftsbedingungen'. At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Abbrechen', 'Anmelden', and 'Registrieren & Scan'. Two yellow arrows point to the 'Patientenname\*' and 'Fallname\*' input fields.


3.

Auf den Reiter "Kiefer" wechseln  
*Switch to the "Jaw" tab*

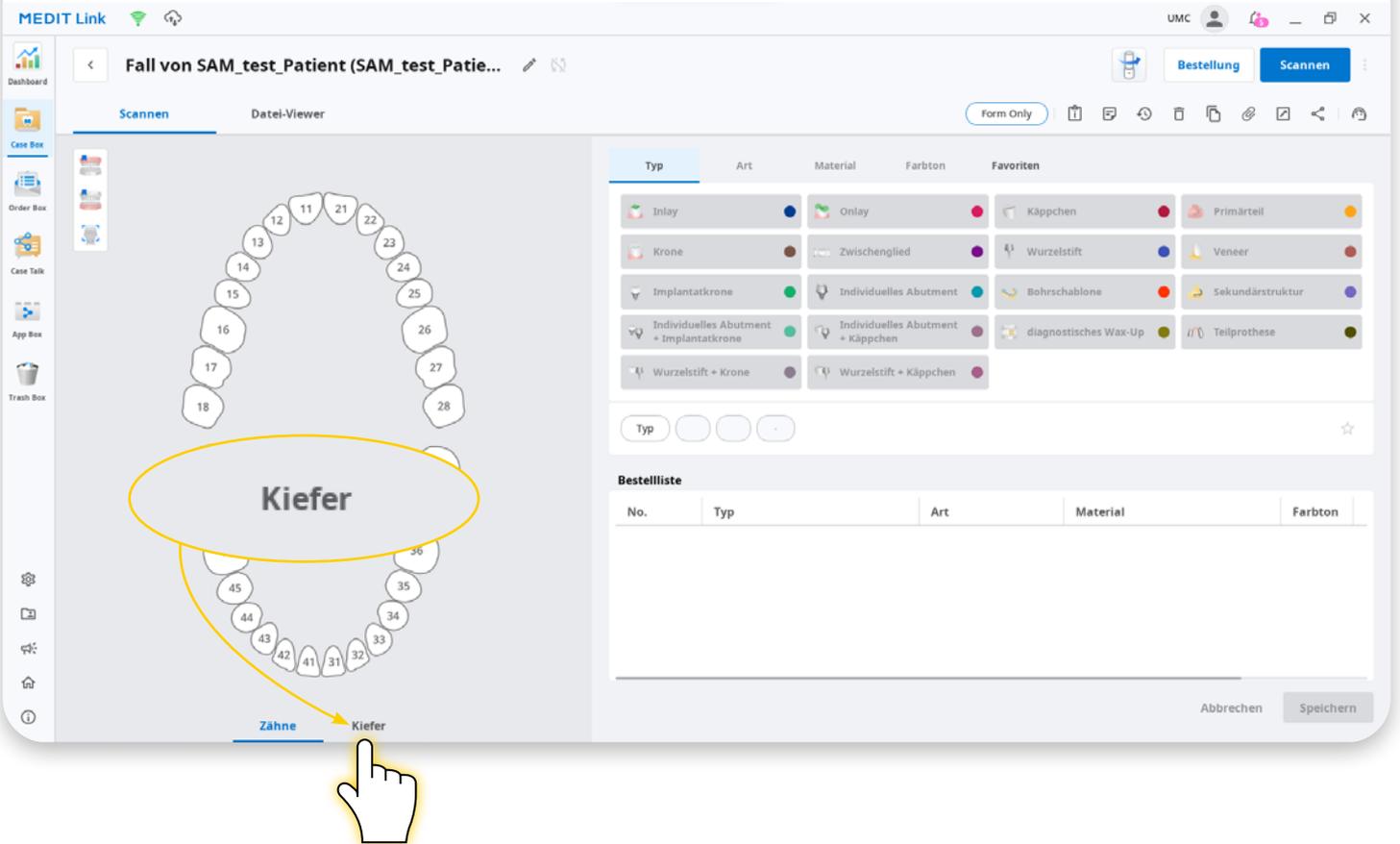

4.

Wählen Sie die Art der Arbeit die Sie benötigen und klicken auf "Scannen"  
*Choose the type of work you need and click on "Scan"*

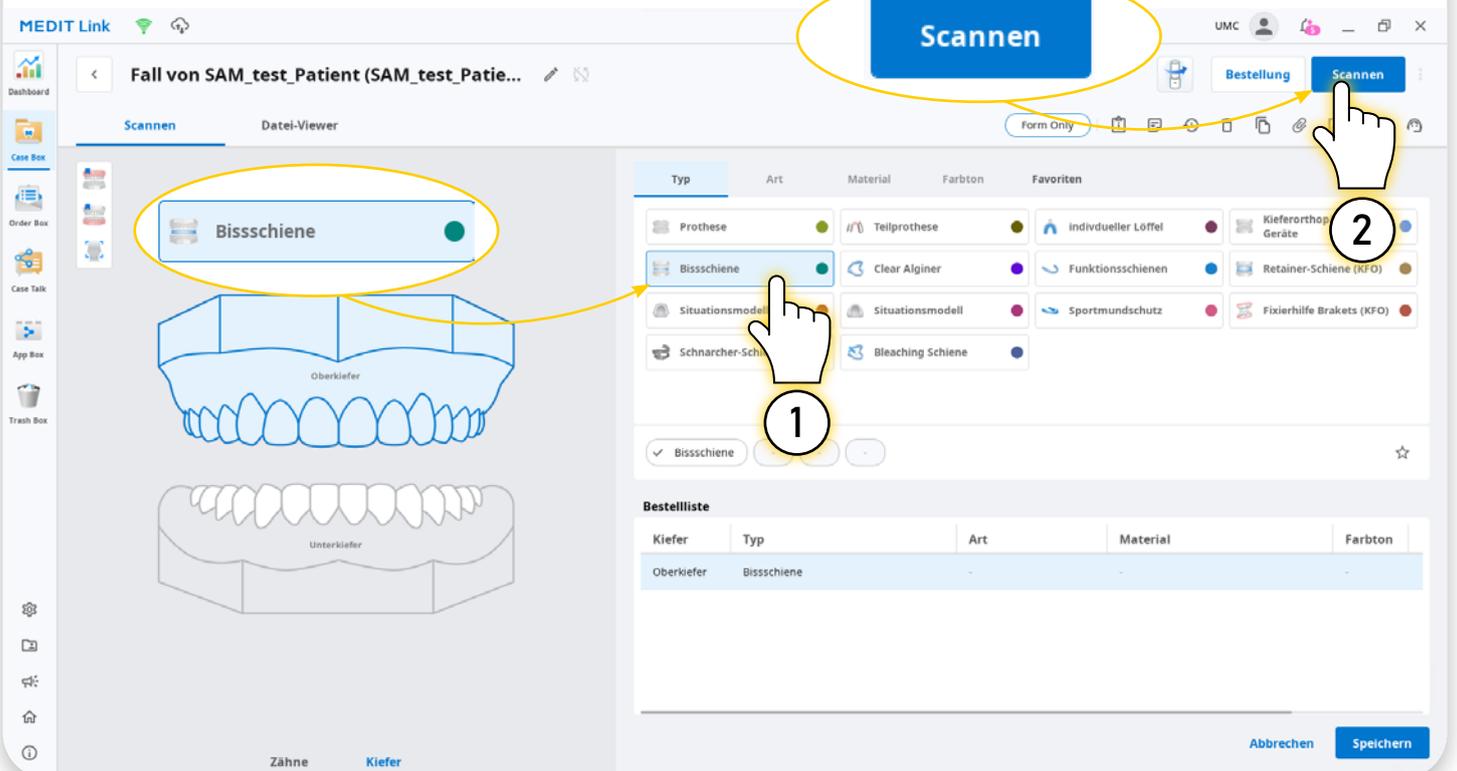

5.

Klicken Sie auf das Kiefersymbol, um den Scanvorgang zu starten


*Click on the jaw icon to start the scanning process*



6.

Beginnen Sie mit dem Scannen des Oberkiefers


*Start with scanning the upper jaw*

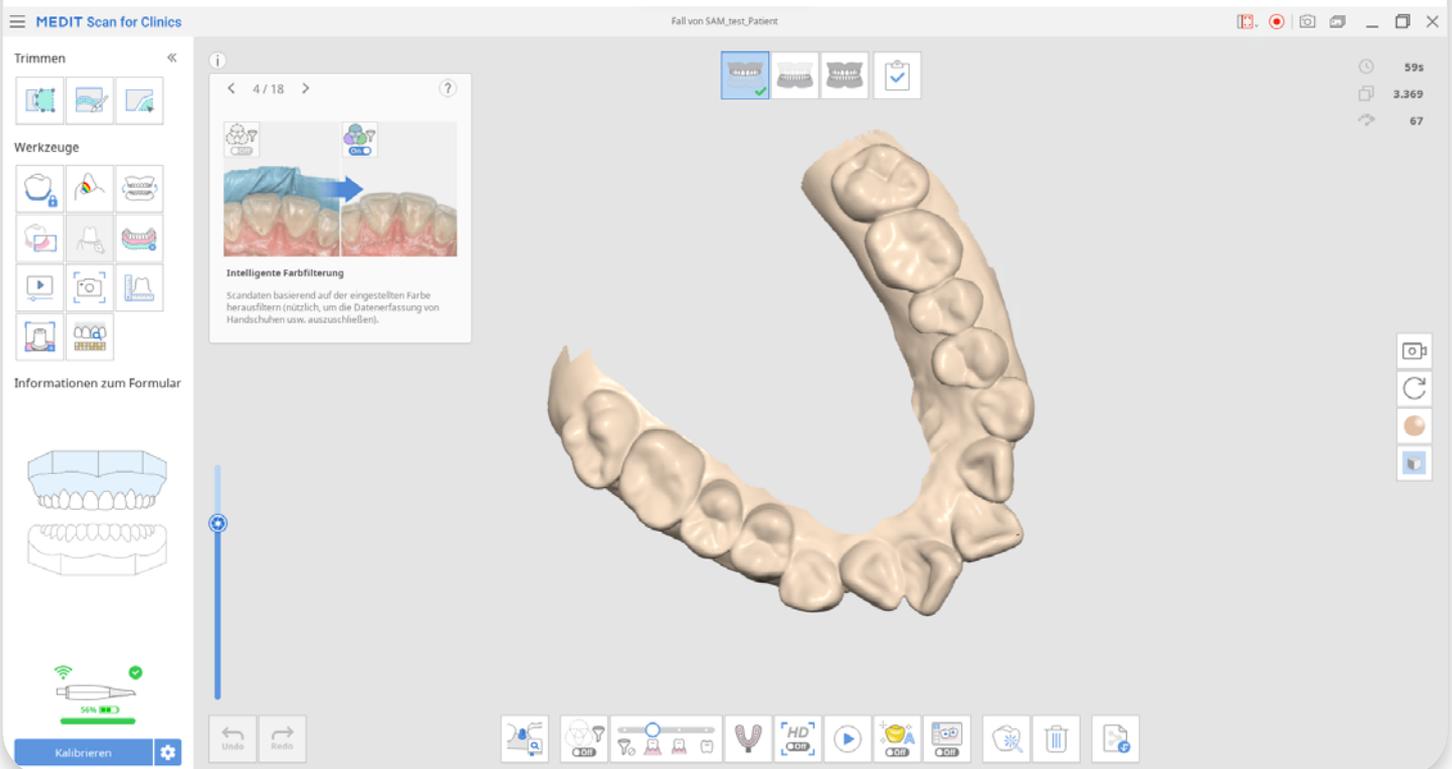

7.

Nach dem Oberkiefer wird der Unterkiefer gescannt


*After the upper jaw, scan the lower jaw*

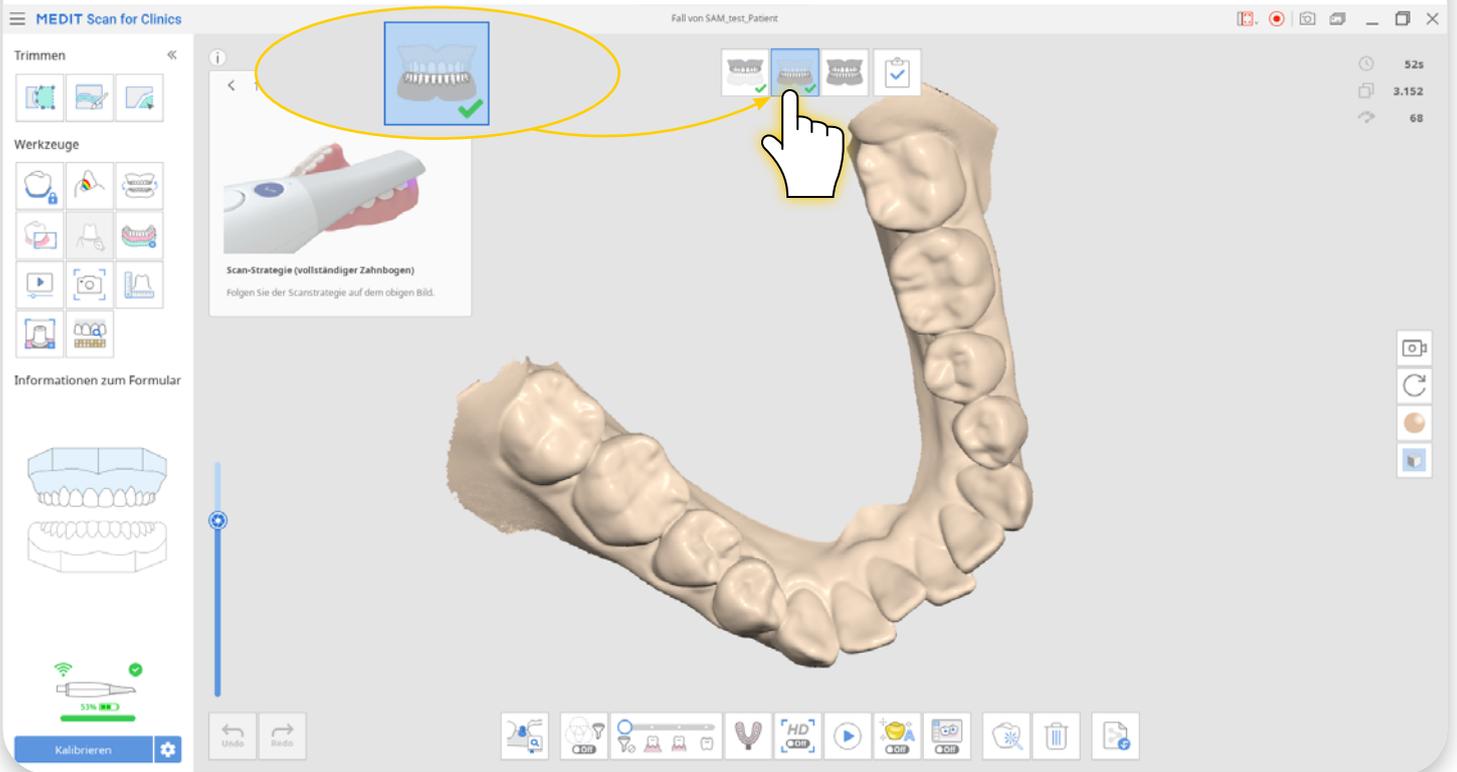

8.


Als nächstes führen Sie den Bite-Scan durch

*Next you make a bite scan*

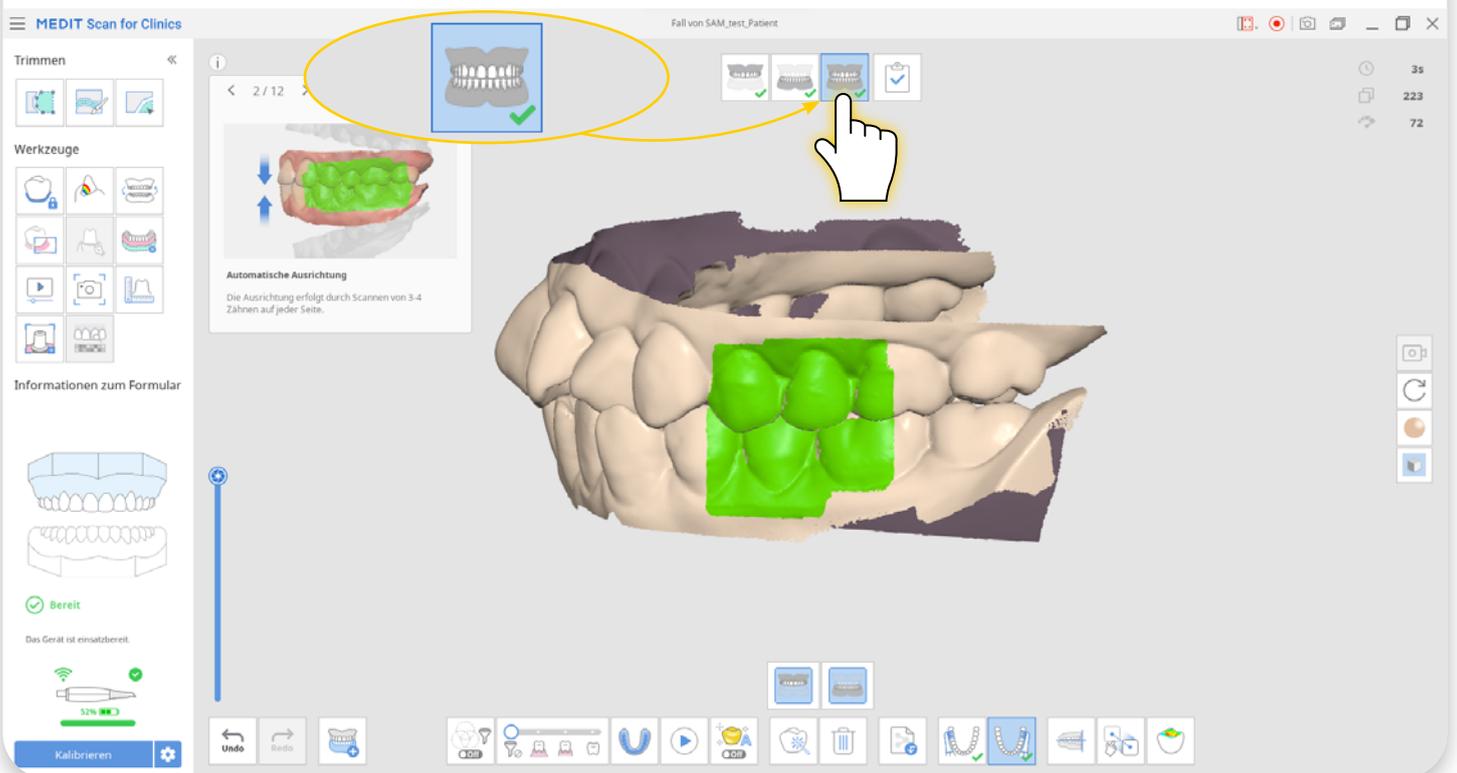


9.

Nach Ihrem üblichen Scanvorgang müssen Sie einen neuen Okklusionscan erstellen  
*After your standard scan process, you need to create a new occlusionscan*

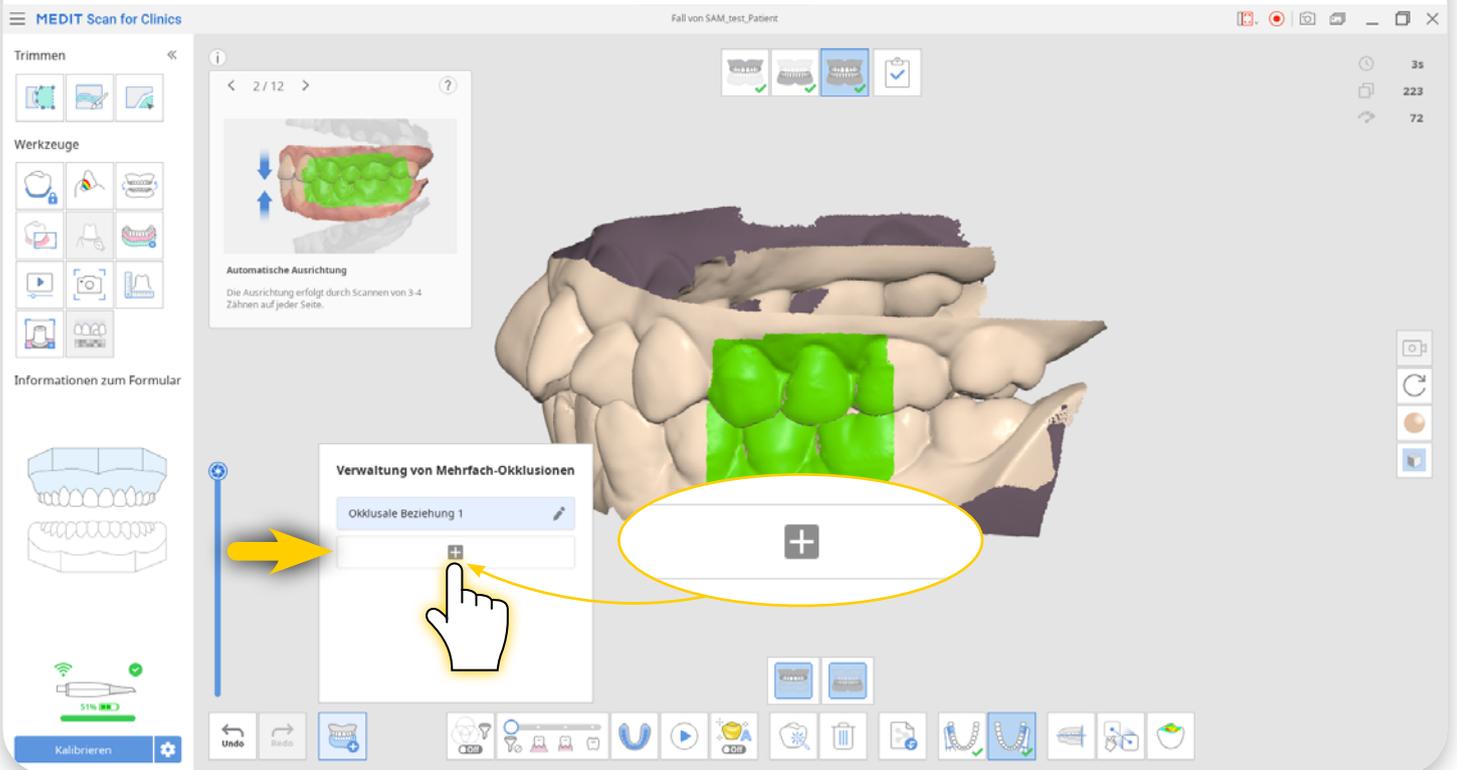

10.

Nennen Sie diesen Scan "AxioPrisa..." oder "AXP..."  
*Name this scan "AxioPrisa..." or "AXP..."*

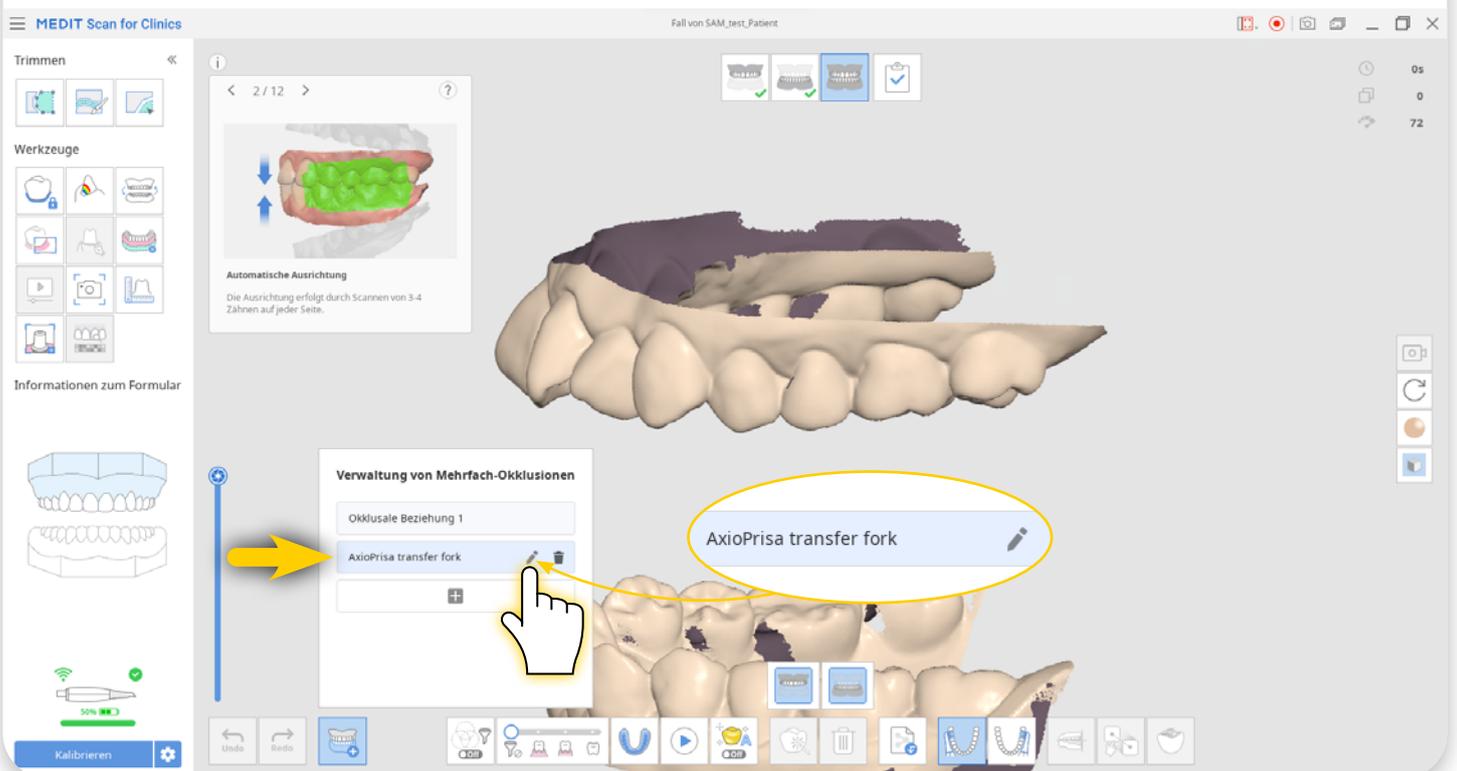

11.

Silikon auf den AxioJig auftragen  
*Put the silicon on the AxioJig*



12.

Transferbogen am Patienten ansetzen  
*Place the transfer bow on the patient*



13.

Patient auf den AxioJig beißen lassen und warten bis das Silicon hart wird  
*Let the patient bite on the Axiojig and wait until the silicon hardens*



14.

AxioPrisa mit dem Oberkiefer scannen  
*Scan AxioPrisa with the upper jaw*

Siehe Karte (16.)  
für die Softwareansicht.

*Check card (16.)  
for software view.*




15.

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie den Transferbogen vom Patienten ab  
*When the scan process is completed, remove the transfer bow from the patient*




16.

Scannen das Landingpad am Ende des AxioPrisa mit einem Teil des Oberkiefers  
*Scan the landing pad at the end of the AxioPrisa with a part of the upper jaw*

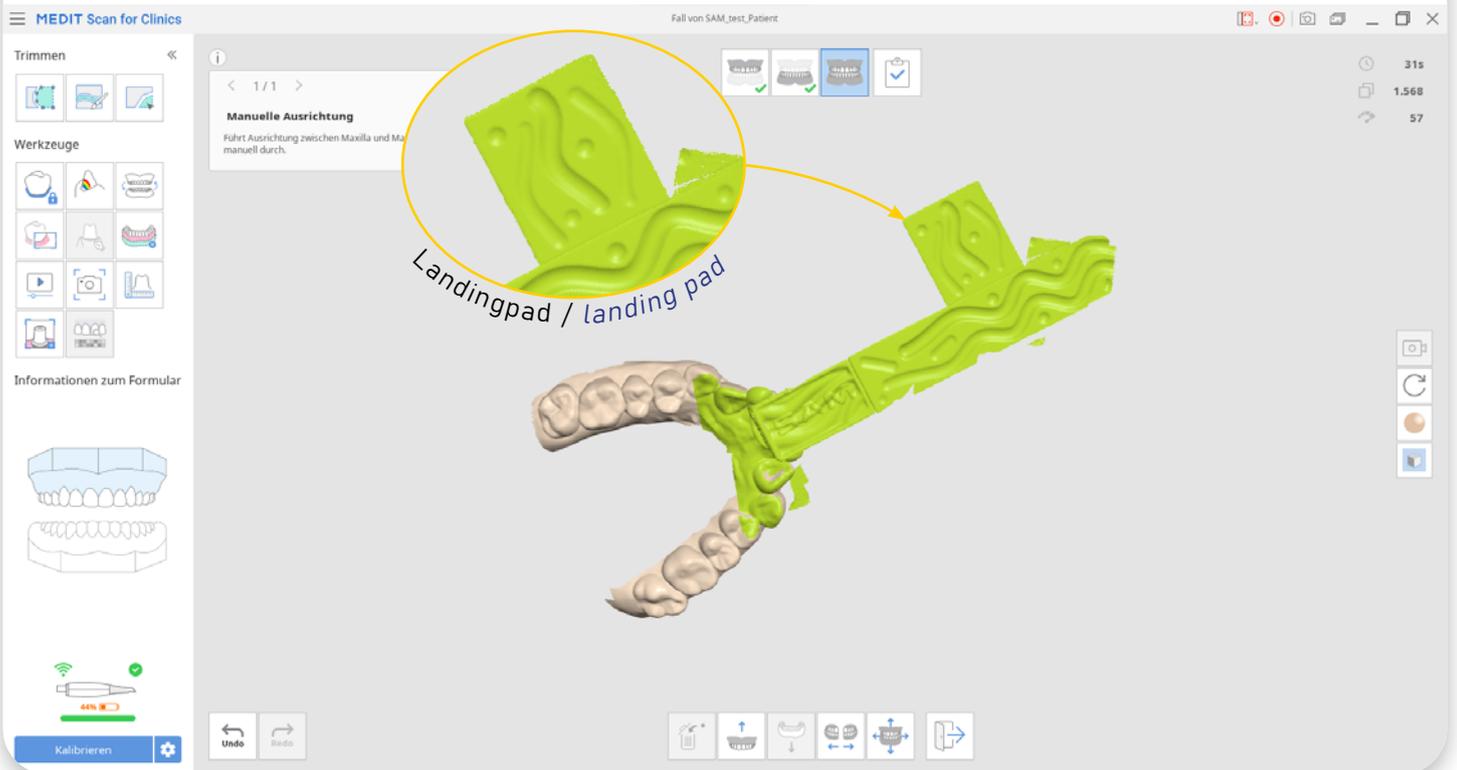

17.


Nach Abschluss dieses Vorgangs müssen Sie den Fall beenden  
*After finishing this process you need to end the case*

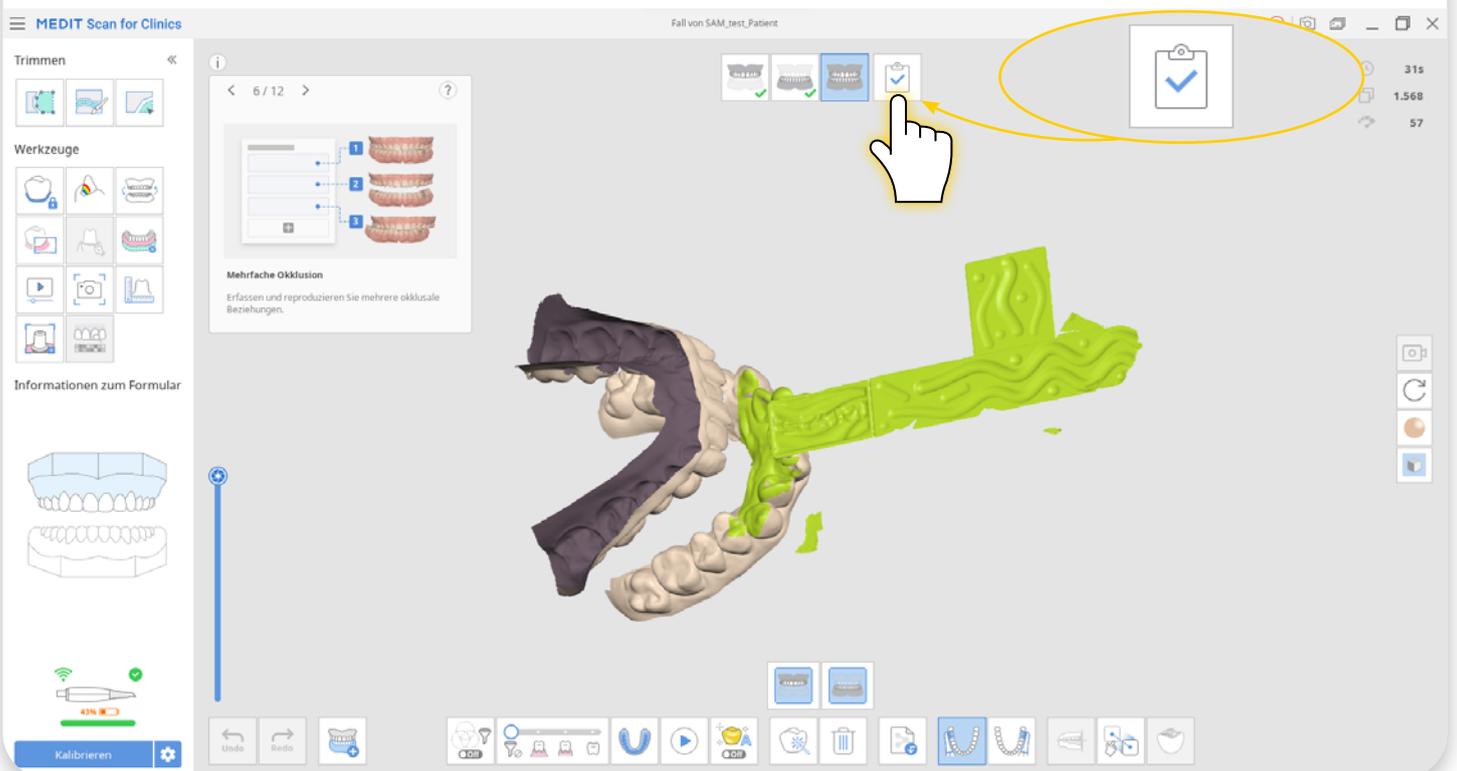

18.

Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist


*Wait until the process is ready*

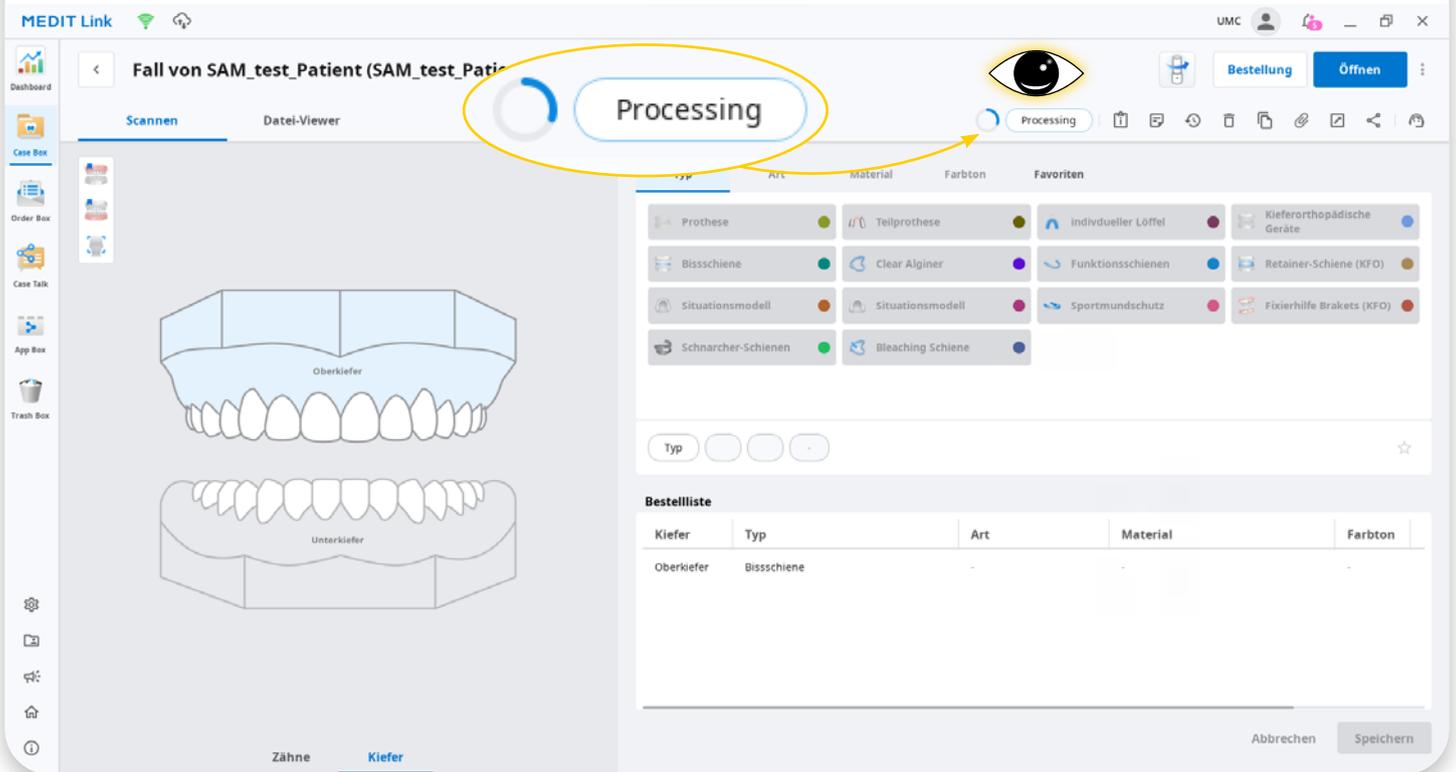

19.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Bestellen".

*When the process is ready "Scan Completed", then click on "Order"*

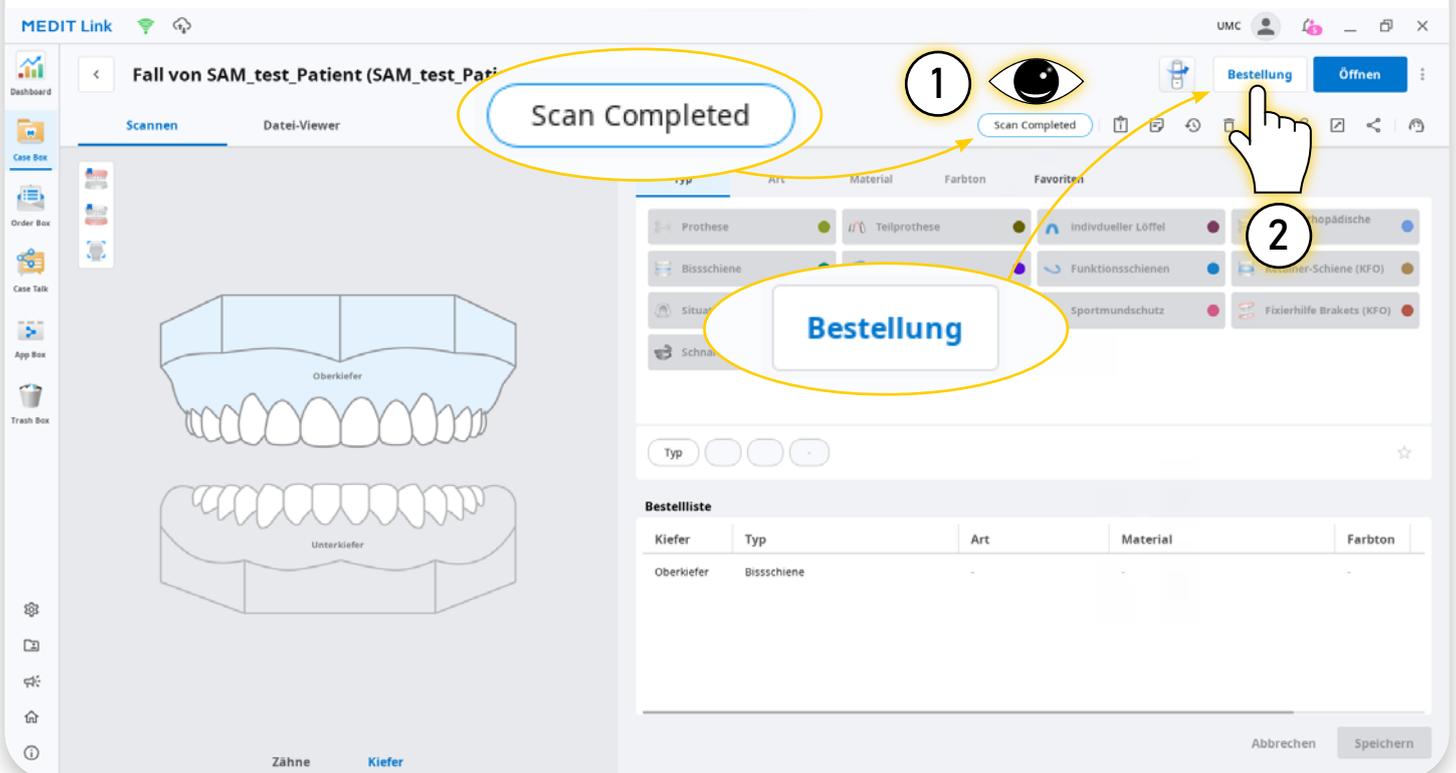

Jetzt können Sie die Dateien auf Ihrem lokalen PC speichern.

*Now you can save the files on your local PC.*

### Dateien in diesem Fall exportieren

Optionen

Dateiliste

Dateien exportieren nach

C:/Users/Scan/Desktop/



Ordnername

22.07.2022-SAM\_test\_Patient

Dateiname

22.07.2022-SAM\_test\_Patient

Typ

exocad



Mesh-Format

Konvertieren Sie Mesh-Dateien in die folgenden Formate

meditMesh  OBJ  PLY  STL

Konvertieren Sie die angehängten Dateien nicht

Bildformat

Konvertieren Sie Bilder in das folgende Format

JPG  JPEG  PNG  BMP

- Dateien komprimieren
- Einzelne Mesh kombinieren
- Alle Okklusalbeziehung exportieren
- Fallinformationen als PDF speichern [Vorschau](#)

Schließen

Exportieren



Nach dem Speichern der Dateien wird der Zielordner automatisch geöffnet.  
Für die weitere Arbeit mit der AxioPrisa-Software benötigen Sie die Ober- und Unterkieferscandatei, sowie die AxioPrisa-Scandatei (die sich im Unterordner "AxioPrisa..." befindet).

*After saving the files, the destination folder will automatically open.*

*For further work with the AxioPrisa software, you need to use the upper and lower jaw scan files, plus the AxioPrisa scan file (which is located in the "AxioPrisa..." sub folder).*

The screenshot shows the AxioPrisa software interface. The main window displays a 3D model of a patient's upper and lower jaw scans. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Scannen, and Datei-Viewer. A file explorer window is open, showing the contents of the folder '22.07.2022-SAM\_test\_Patient'. The file explorer lists the following files:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
AxioPrisa transfer fork	22.07.2022 11:59	Dateiordner	
22.07.2022-SAM_test_Patient-lowerjaw.m...	22.07.2022 11:59	MEDITMESH-Datei	1.770 KB
22.07.2022-SAM_test_Patient-lowerjaw	22.07.2022 11:59	STL-Datei	8.990 KB
22.07.2022-SAM_test_Patient-occlusionfir...	22.07.2022 11:59	MEDITMESH-Datei	549 KB
22.07.2022-SAM_test_Patient-occlusionfirst	22.07.2022 11:59	STL-Datei	2.811 KB
22.07.2022-SAM_test_Patient-occlusionse...	22.07.2022 11:59	MEDITMESH-Datei	281 KB
22.07.2022-SAM_test_Patient-occlusionse...	22.07.2022 11:59	STL-Datei	1.449 KB
22.07.2022-SAM_test_Patient-upperjaw...	22.07.2022 11:59	MEDITMESH-Datei	1.661 KB
22.07.2022-SAM_test_Patient-upperjaw	22.07.2022 11:59	STL-Datei	8.524 KB

The software interface also shows a 'Scan Completed' notification and various toolbars for file management and viewing. The 3D model displays the upper and lower jaw scans with labels 'Oberkiefer' and 'Unterkiefer'.

## **! Wichtiger Hinweis zur Verarbeitung von Scans in AxioSnapMount !**


Durch eventuelle Artefakte oder Fehler im Scan kann der Generierungsprozess einen Fehler aufweisen. Zur Vorbeugung ist es wichtig, dass der Scan des Oberkiefers sowie Unterkiefers daher von Fehlern befreit wird ( putzen der Scans in der Scansoftware / CAD-Software ).

Anfällig sind Löcher im Scan oder überlagernde Oberflächen.

## **! Important note on processing scans in AxioSnapMount !**

*Due to possible artifacts or errors in the scan, the generation process may show an error. To prevent this, it is important that the scan of the maxilla as well as the mandible is therefore freed from errors ( cleaning the scans in the scan software / CAD software ).*

*Holes in the scan or superimposed surfaces are susceptible.*

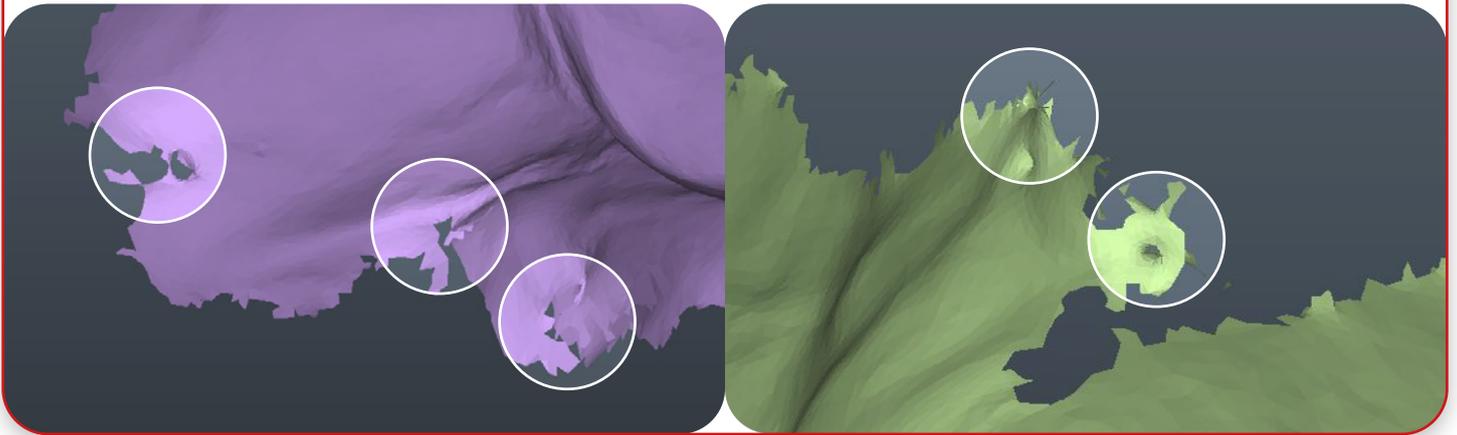

# Kundenservice

## Customer service

# MEDIT



## Link

Bei Fragen zum Scanner oder zur MEDIT Software, kontaktieren Sie bitte den:

MEDIT Kundenservice:

<https://info.medit.com/contact-us-de>

MEDIT Help Center:

<https://support.medit.com/hc/de-de>

*If you have any questions about the scanner or the MEDIT software, please contact:*

*MEDIT Customer Service:*

<https://info.medit.com/contact-us>

*MEDIT Help Center:*

<https://support.medit.com/hc/en-us>

# SAM



## axioprisa

Bei Fragen zu axioprisa Hardware oder Software kontaktieren Sie die SAM Präzisionstechnik:

Für allgemeine Fragen zum Produkt:

[Info@smart-dental.de](mailto:Info@smart-dental.de)

Bei technischen Problemen:

[it-support@sam-dental.de](mailto:it-support@sam-dental.de)

*For questions about Axioprisa hardware or software contact us at SAM Präzisionstechnik:*

*For general questions about the product:*

[it-support@sam-dental.de](mailto:it-support@sam-dental.de)

*In case of technical problems:*

[it-support@sam-dental.de](mailto:it-support@sam-dental.de)

Supported by



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP