




1. Erstelle einen neuen Patientenfall / *Create a new patient case*

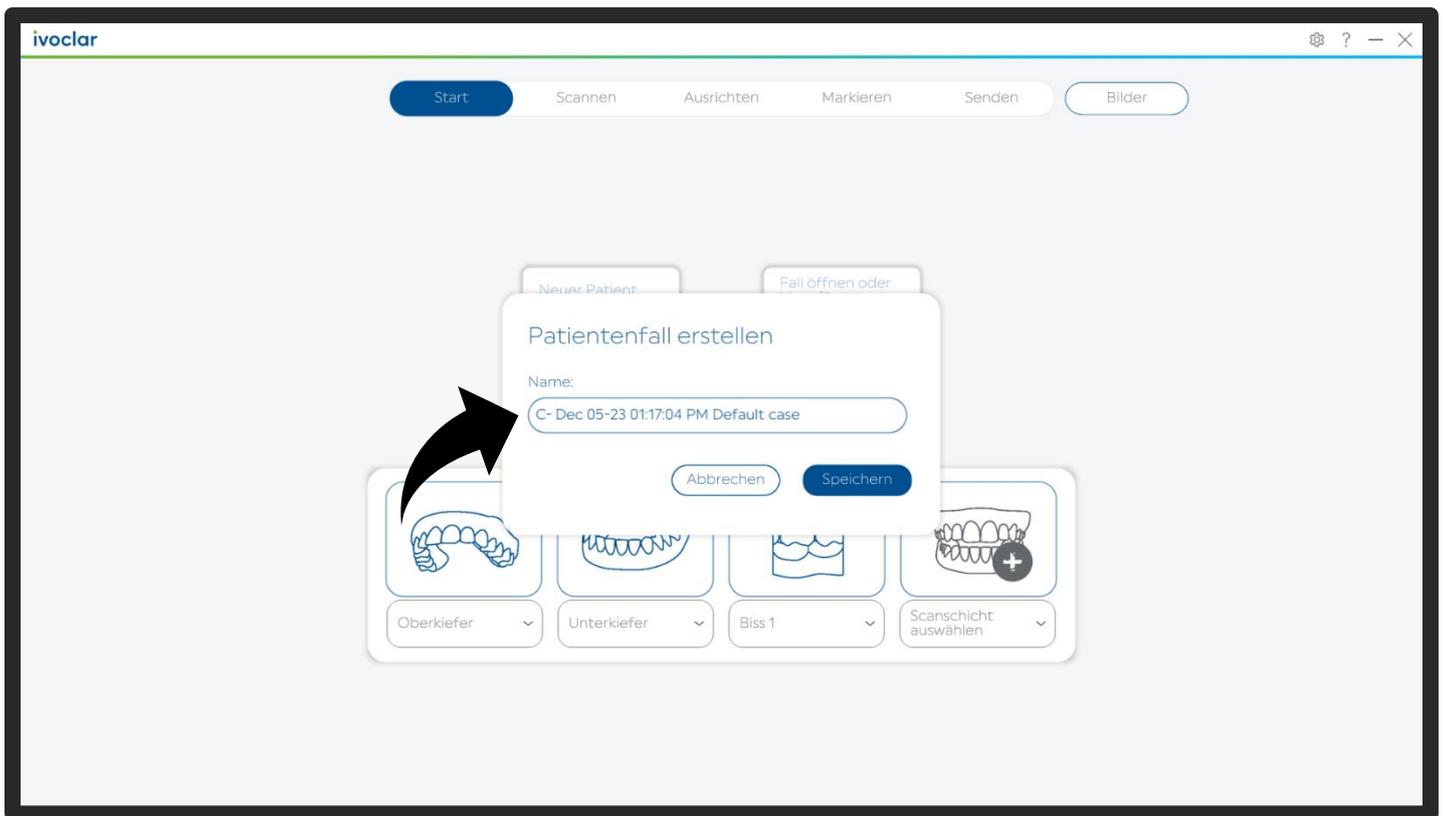

2. Wähle rechts die Schaltfläche „Scanansicht auswählen“ / *Select the "Select scan view" button on the right*

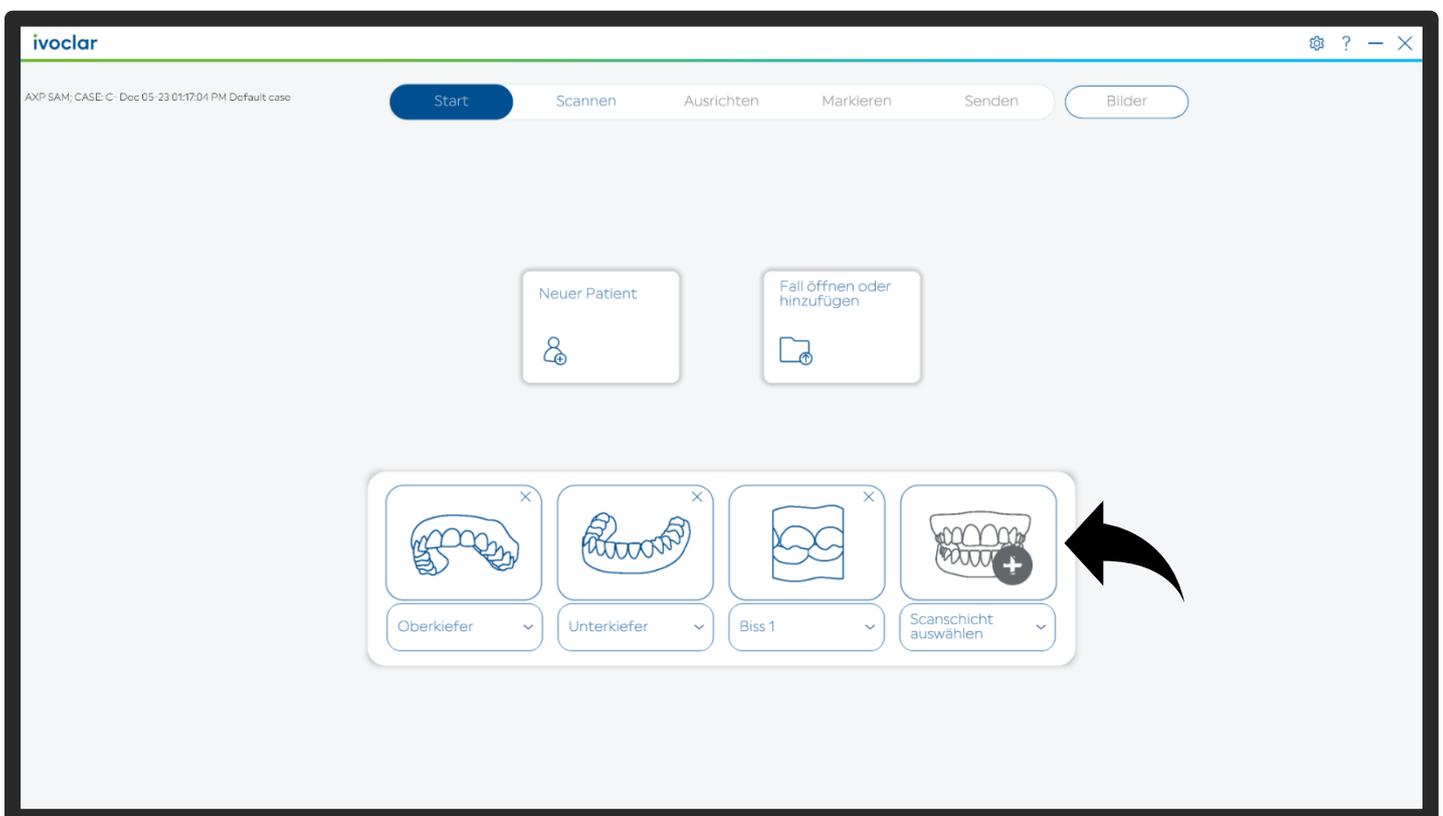


3. Klicke dann auf „Scanbody OK“ / *Then click on "Scanbody OK"*

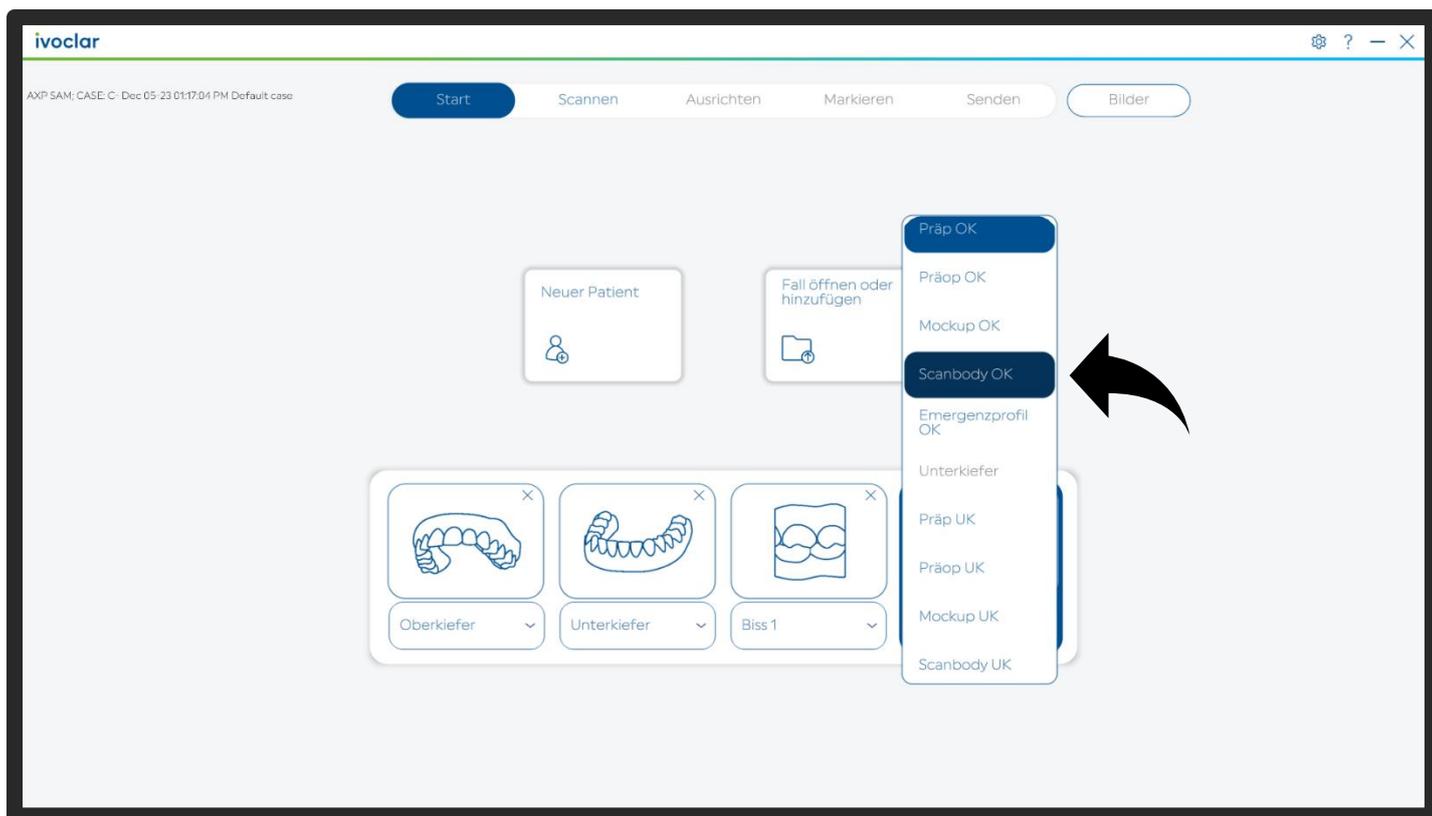


4. Wurde die Auswahl bestätigt, kann man zum Scannvorgang wechseln / *Once the selection has been confirmed, you can switch to the scanning process*




5. Die Workflowreihfolge wird nun abgearbeitet. Oberkiefer -> Unterkiefer -> AXP-Scan (Scanbody) / *The workflow sequence is now processed. Upper jaw -> Lower jaw -> AXP scan (scanbody)*

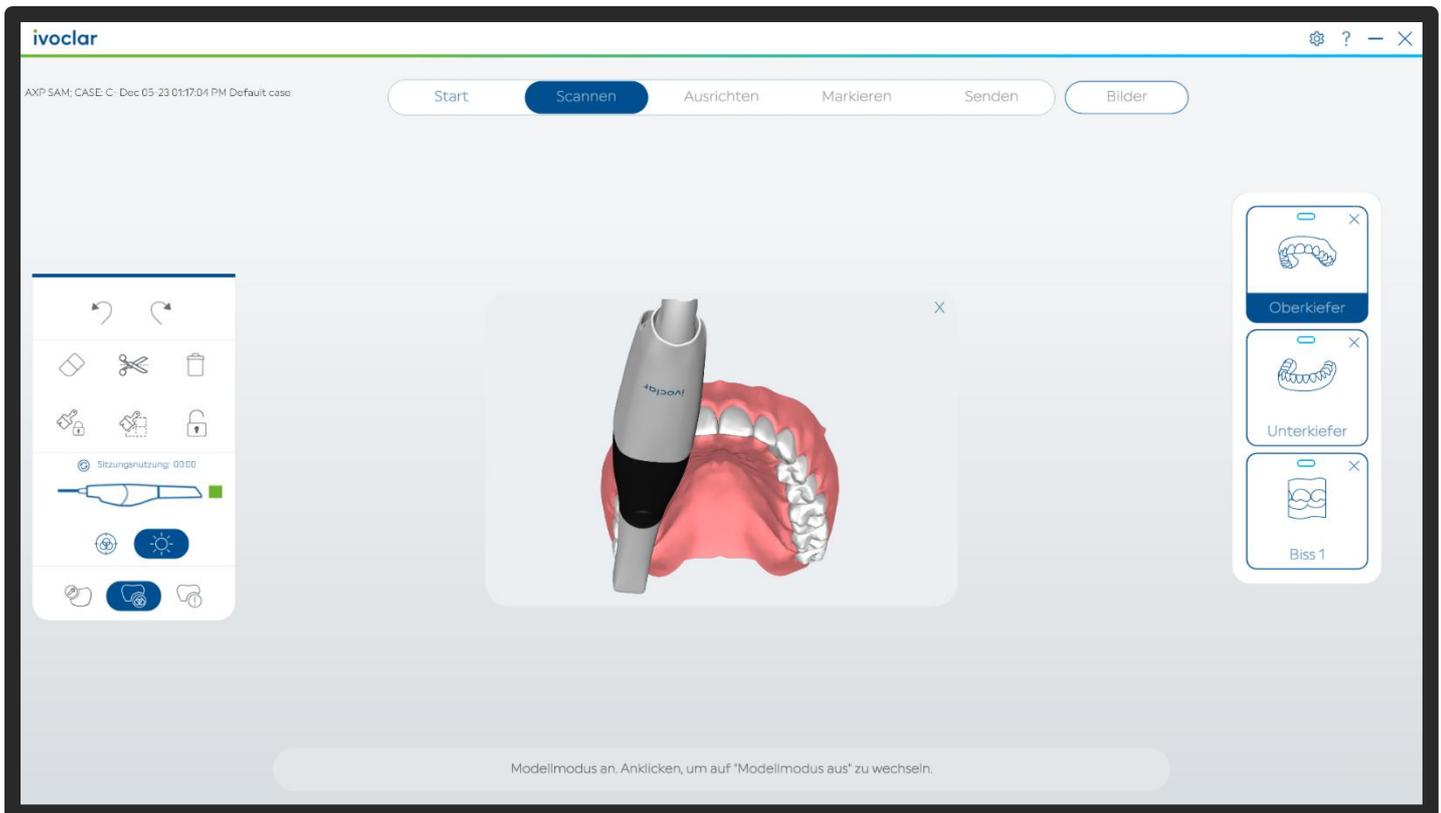


6. Der Oberkiefer Scan kann dupliziert werden, um genauere Ergebnisse und einen schnelleren Scan zu erhalten / *The upper jaw scan can be duplicated to obtain more accurate results and a faster scan*

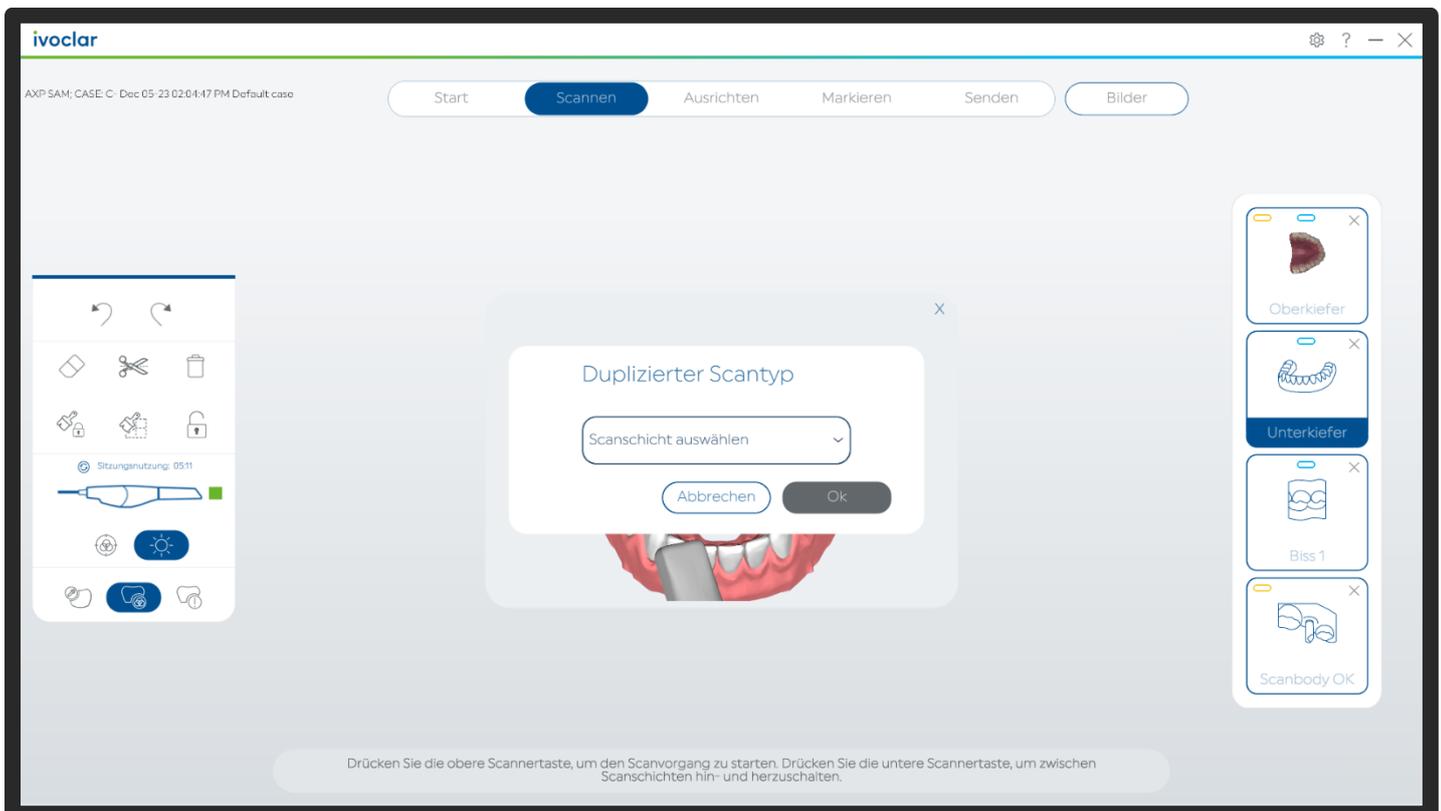


7. Das Duplikat wird dann auf die Scanschicht „Scanbody OK“ übertragen / *The duplicate is then transferred to the "Scanbody OK" scan layer*

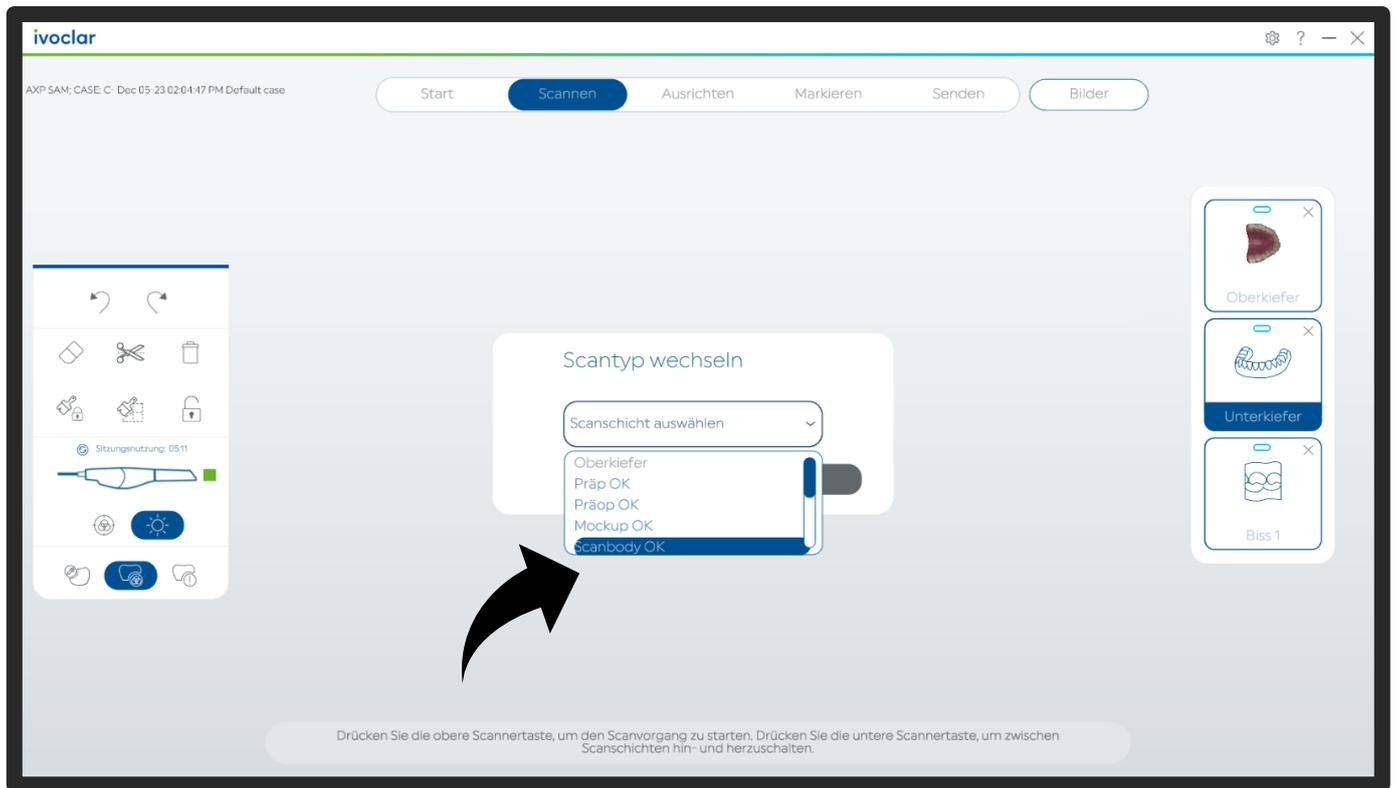


8. Wurde der Oberkieferscan, kann der AxioPrisa Bissgabelträger darüber gescannt werden. **!Wichtig ist, dass von der Okklusion bis zum Landingpad am Sagittalstab aufgezeichnet wird!** *if the upper jaw scan has been performed, the AxioPrisa bite fork support can be scanned over it. It is important to record from the occlusion to the landing pad on the sagittal bar!*

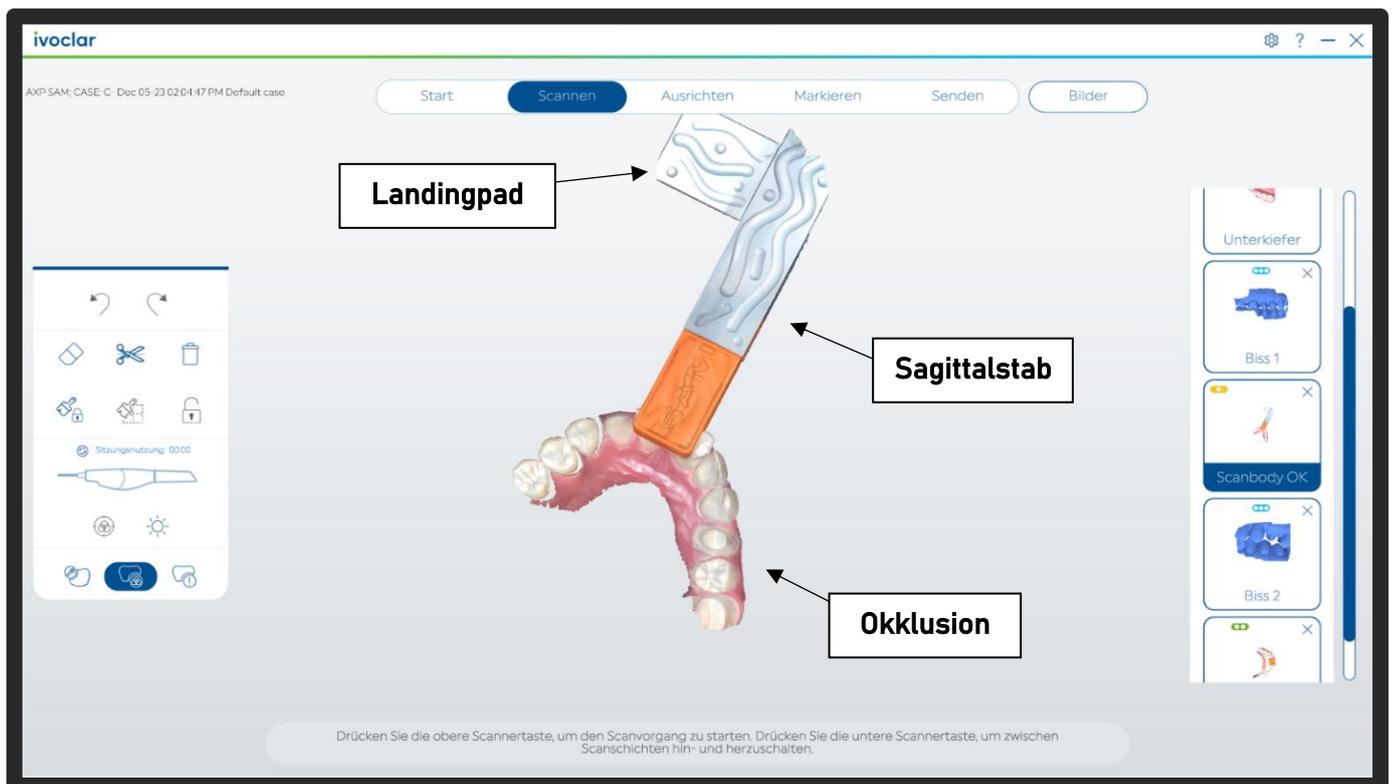


9. Lege jetzt den Transferbogens mit den AxioPrisa Bissgabelträger an dem Patienten an. Eine Anleitung zur Nutzung von dem AxioQuick Transferbogen finden man [hier](#).
Now place the transfer bow with the AxioPrisa bite fork carrier on the patient. Instructions for using the AxioQuick transfer bow can be found [here](#).

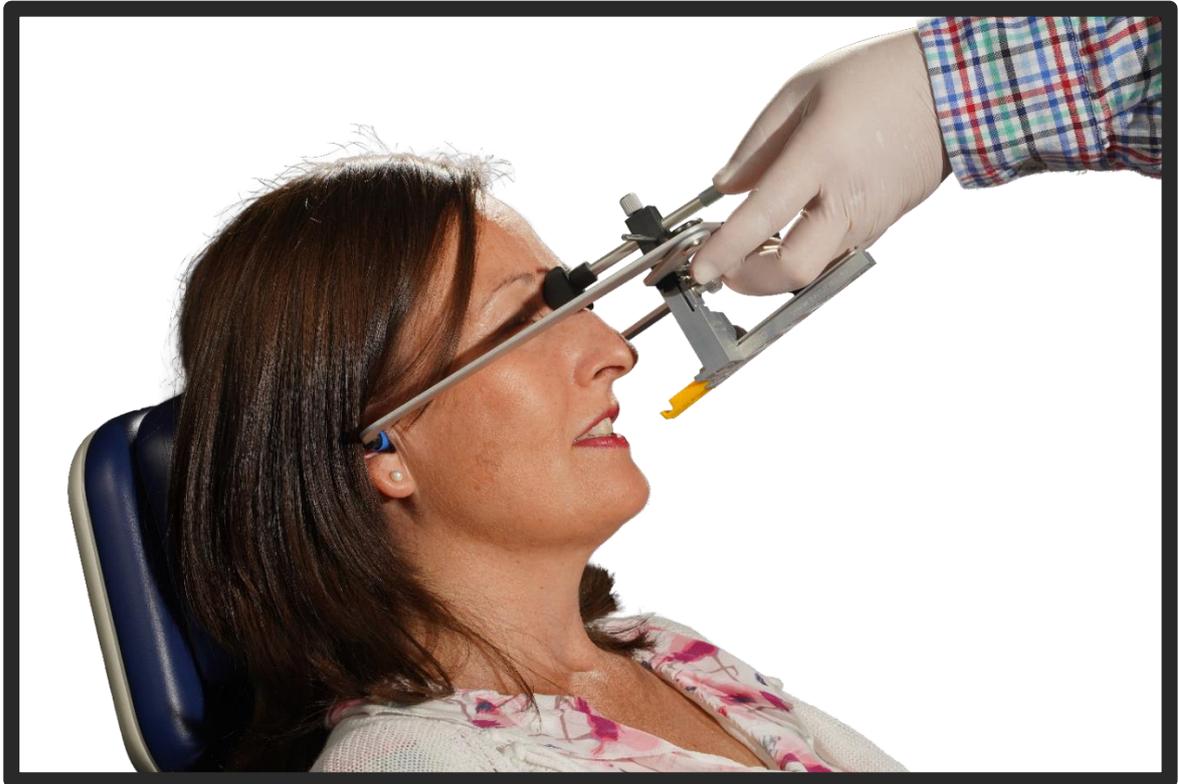


10. Geben Sie eine kleine Menge Silikon in die Vertiefung des AxioJigs und führen Sie den Jig an die Frontzähne.
Place a small amount of silicone in the recess of the AxioJig and guide the jig to the anterior teeth.

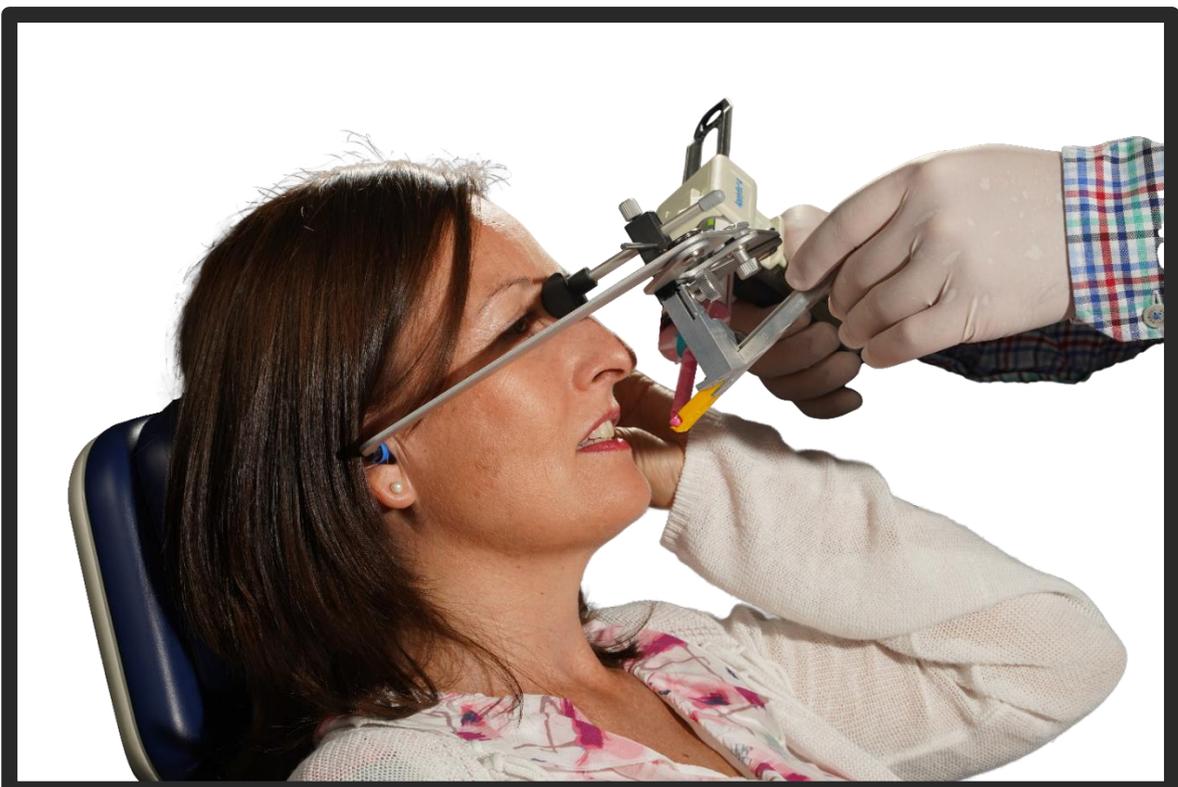

11. Der Patient muss in das Silikon beißen und den AxioJig fixieren. Wenn das Silikon hart ist, schließe die Schraube auf der rechten Seite des Sagittalstabs und der Patient kann den Mund öffnen.
The patient must bite into the silicone and fix the AxioJig. When the silicone is hard, close the screw on the right side of the sagittal bar and the patient can open the mouth.

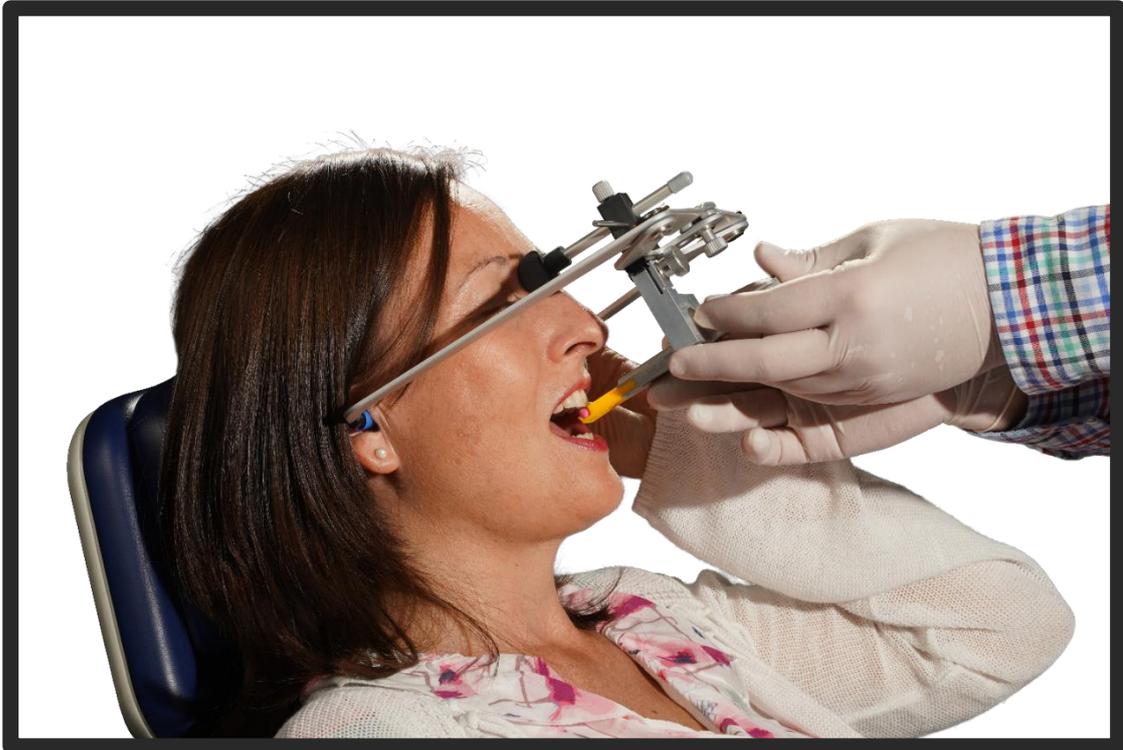


12. Nun kann der AxioPrisa gesannt werden.
The AxioPrisa can now be tensioned.

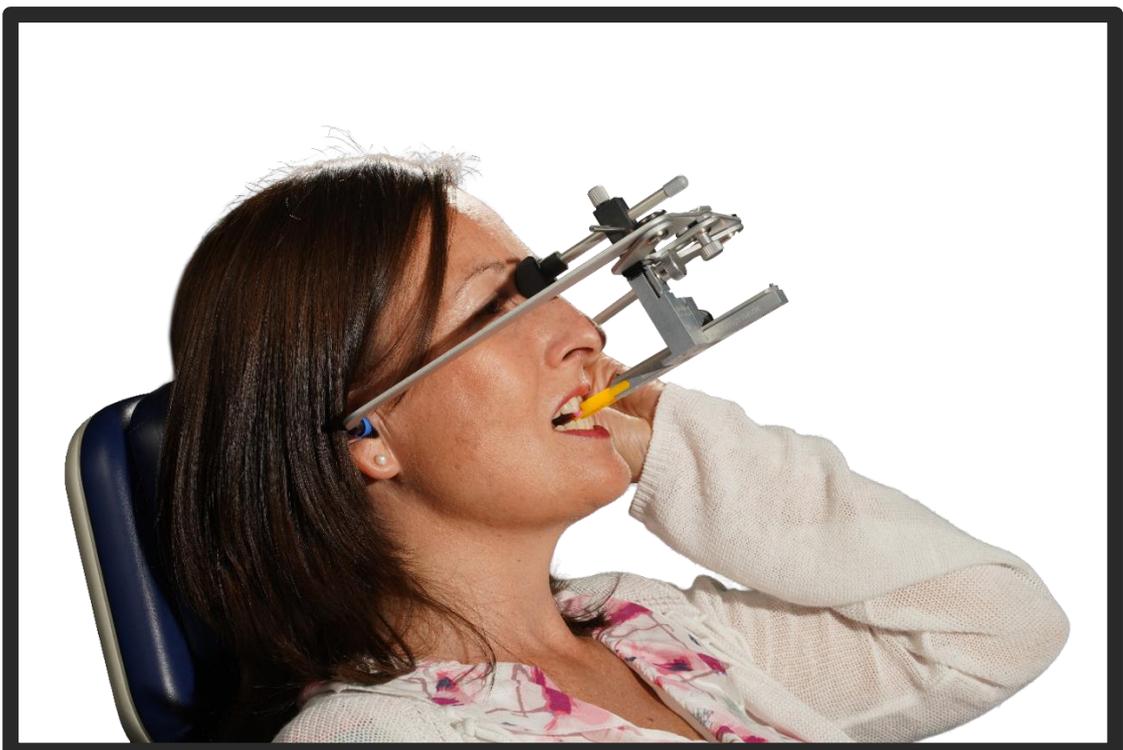


Nach dem Scannen muss eine Verbindung zwischen der Okklusion und dem Ladingpad am Ende des Sagittalstabs bestehen.

After scanning, there must be a connection between the occlusion and the loading pad at the end of the sagittal bar.

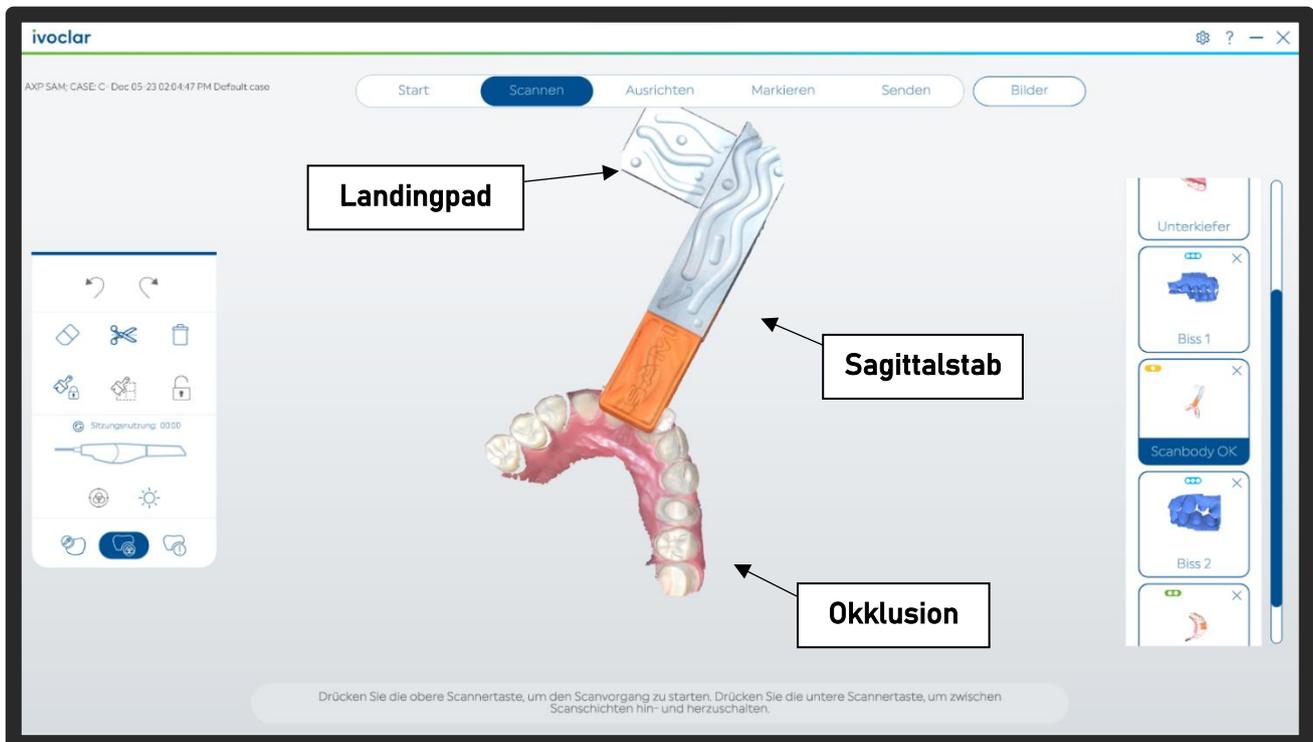

13. Wenn der Fall abgeschlossen ist, sollte dieser als STL-, PLY- oder OBJ- Datei exportiert werden.
When the case is complete, it should be exported as an STL, PLY or OBJ file.

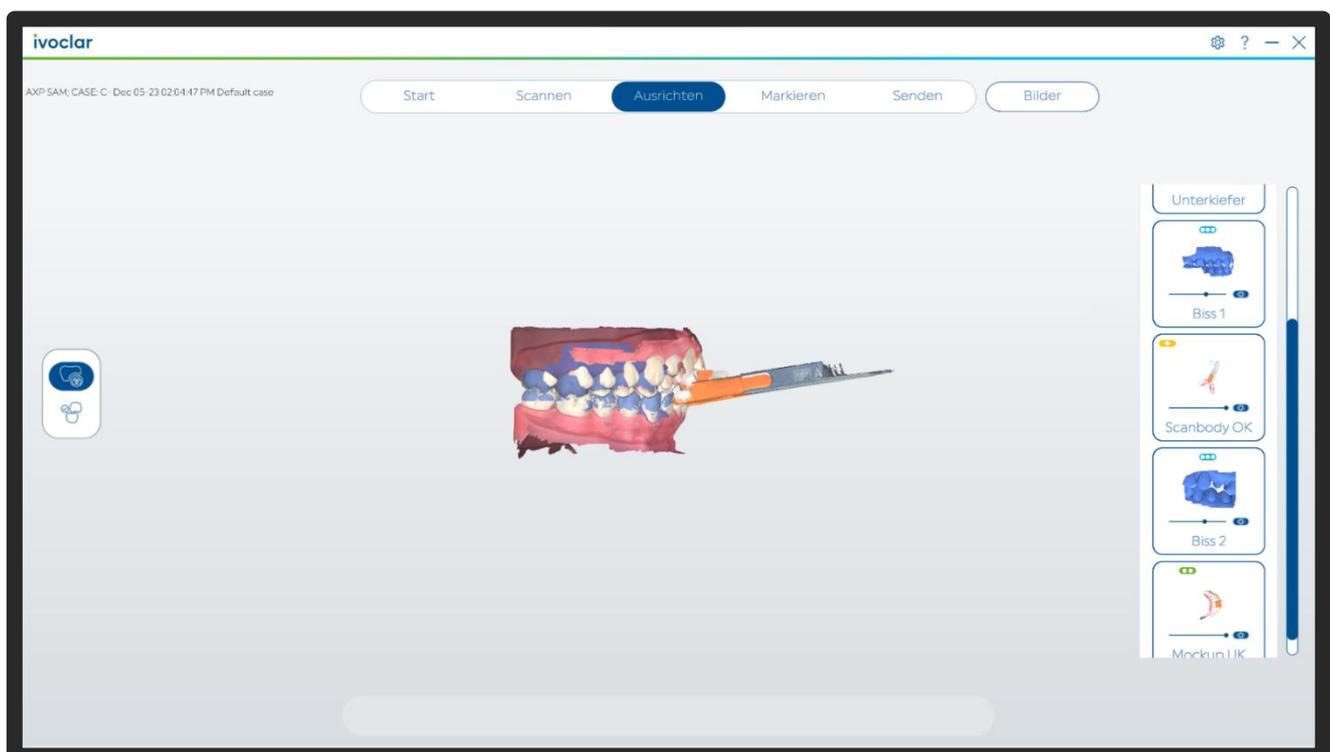

! Wichtiger Hinweis zur Verarbeitung von Scans in AxioSnapMount !


Durch eventuelle Artefakte oder Fehler im Scan kann der Generierungsprozess einen Fehler aufweisen. Zur Vorbeugung ist es wichtig, dass der Scan des Oberkiefers sowie Unterkiefers daher von Fehlern befreit wird (putzen der Scans in der Scansoftware / CAD-Software).

Anfällig sind Löcher im Scan oder überlagernde Oberflächen.

! Important note on processing scans in AxioSnapMount !

Due to possible artifacts or errors in the scan, the generation process may show an error. To prevent this, it is important that the scan of the maxilla as well as the mandible is therefore freed from errors (cleaning the scans in the scan software / CAD software).

Holes in the scan or superimposed surfaces are susceptible.

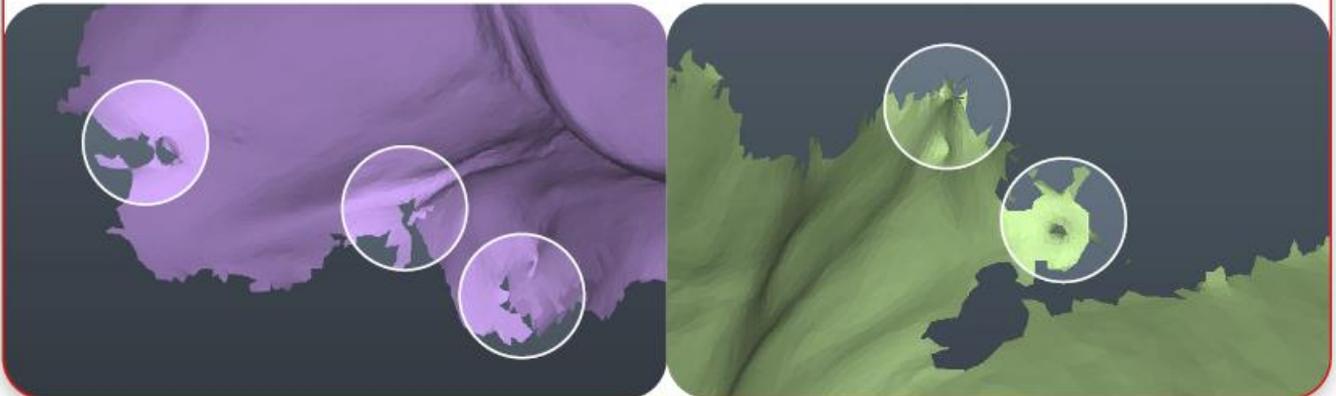

Kundenservice *Customer Service*



Weitere Informationen zu den Ivoclar Produkten
finden Sie online unter:

www.ivoclar.com

Bei Anwenderfragen rund um das
Produktportfolio von Ivoclar oder technischen
System-störungen von Software oder
Hardware ist Customer Care Ihr direkter
Ansprechpartner. Customer Care erreichen Sie
von Montag bis Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr
unter folgender Nummer:

Service Hotline: +800 7000 70 80

For further information on Ivoclar products can
be found online at:

www.ivoclar.com

If you have questions or need assistance with
software, equipment, or repairs, Customer Care
is here to help. Customer Care is available from
Monday to Friday from 8.00 a.m. to 6.00 p.m. at
the following number:

Service Hotline: +800 7000 70 80

Bei Fragen zu AxioPrisa
Hardware oder Software
kontaktieren Sie die SAM Präzisionstechnik:

Für allgemeine Fragen zum Produkt:

Info@smart-dental.de

Bei technischen Problemen:

it-support@sam-dental.de

For questions about AxioPrisa
hardware or software
contact us at SAM Präzisionstechnik:

For general questions about the product:

Info@smart-dental.de

In case of technical problems:

it-support@sam-dental.de